

いつでも殺菌済みのクリーンなスリッパをお使いいただけます。

クリーンな空間の味方です。



一般医療機器
届出番号 33B2X00005000001

スリッパ殺菌ディスペンサー SSDX



SSDX

SSDX-V

清潔

光触媒加工の専用防臭スリッパを
紫外線で殺菌し、清潔な状態を保ちます

新しい


より判りやすく、より機能的に
従来品をベースにデザインをリニューアルしました

コンパクト

10足収納で「高さ1207×幅341×奥行445mm」
コンパクト設計なので置き場所を選びません

スリッパ殺菌のしくみ

紫外線を3方向から照射

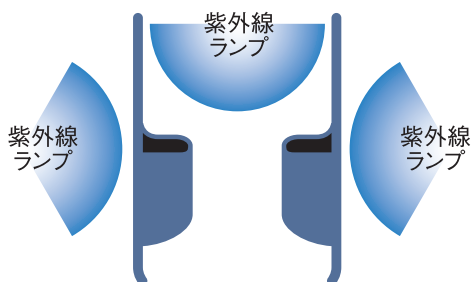

- すべての面に紫外線が照射されます。
- 前あきスリッパなので、つま先部分もしっかり殺菌できます。

専用スリッパを
ご使用ください
専用スリッパ



※本体ご購入時に専用スリッパが10足付属しております。

シンプル&コンパクトデザインで、わずかなスペースでも設置可能。 スッキリとした印象を与え、清潔感をアピール。




■殺菌効果

(社団法人 北里研究所 医療環境科学センターの分析結果より)

菌種	紫外線照射時間	
	90%殺菌率時	99.99%殺菌率時
ブドウ球菌	10秒	40秒
大腸菌	10秒	40秒
緑膿菌	55秒	3分
真菌	20分	30分
水虫菌	20分	30分

■使用法


1 使用済のスリッパを
本体上部の返却口に置くと
返却口が開き、
専用スリッパが
ボックス内に
収納されます

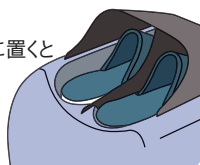

2 紫外線が
スリッパの裏側、
内側とも
均一に殺菌します

3 ボックス内に
収納されている間中、
殺菌されています

4 ボタンを押すと、
ボックスの下から
一足ずつスリッパが
出てきます

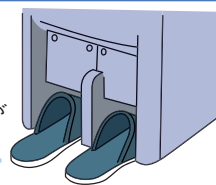

※スリッパを正しく返却しないと詰まりの原因となりますのでご注意ください

■仕様

名称	スリッパ殺菌ディスペンサー
型式	SSDX(-V)
電源電圧	AC100V
周波数	50/60Hz(スイッチによる切替式)
消費電力	60VA
外径寸法	幅341×奥行445×高さ1,207mm
重量	31kg
紫外線照射量	100μW/cm ² 以上
スリッパ収納数	10足
使用環境条件	10~40℃
付属品	専用スリッパ(10足)、専用マット、付属シール、クリーナーセット

■本体

スリッパ殺菌ディスペンサー
ブルー(SSDX)、ベージュ(SSDX-V)

■専用スリッパ

ブルーグレー、ミントグリーン、ワインレッド、ココアブラウン / 10足

■専用クリーナーセット

■オプション


■追加スリッパ

ブルーグレー、ミントグリーン、ワインレッド、ココアブラウン / 10足

■専用クリーナーセット

■紫外線ランプ (3本)

グロウランプ (3個) セット

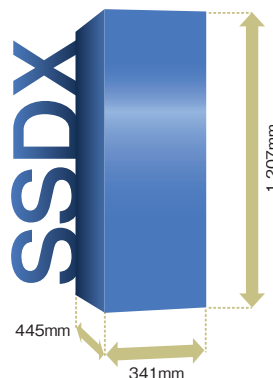

■名入れ (有料)

発注単位	10足
字体	丸ゴシック
文字色	白
印刷可能スペース	1段組:10×80mm / 2段組:25×80mm

1列10文字の2列で最大20文字まで
印刷可能

※名入れ後の返品はお受けできませんので、
ご注文時に名入れ文字のご指示・ご確認
は入念をお願い致します。納品後の名入
れはお受けできません。



■追加専用スリッパ(10足単位)

本体付属スリッパ10足とは別に、
スリッパのみのご注文ができます



■定期交換部品

品名	紫外線ランプ(3本セット) 15W×1灯 / 6W×2灯
交換目安	3,000時間

※紫外線ランプは効果に寿命があるため、定期
交換が必要です。約1年での交換をお薦め
します。

▲ 安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。
●無理な操作は商品の寿命を縮め故障、事故の原因となることがあります。

※記載された内容及び仕様については、予告なく変更することがあります。
※本カタログ表面イメージ写真著作権：©Lev Dolgatshtov-Fotolia.com

株式会社 IHI

営業本部 総合営業部

〒135-8710 東京都江東区豊洲三丁目1番1号 豊洲IHIビル

TEL(03)6204-7111

URL:www.ihico.jp/ozone/

取り扱い・お問い合わせ
お気軽にご相談ください。

株式会社IHIシパウラ