

【ユーザーレポート：とみやま内科クリニック様】

〒236-0031 横浜市金沢区六浦1-1-7ライブピア金沢八景201

オゾン水内視鏡洗浄消毒機OED-1000S Plus



※とみやま内科クリニック様ホームページはこちら

横浜市金沢区のとみやま内科クリニック様は、2008年に開院。地域の「かかりつけ医」として内科全般を診療しながら、富山院長が専門とされてきた内視鏡検査や腹部超音波検査などの消化器疾患の診断治療を実施されてきました。年間約300件の内視鏡検査を実施。富山院長とスタッフの方にOED-1000S Plusの導入経緯や、ご使用感を伺いました。



インタビューに答えていただいた富山院長 ↑

—導入の経緯を教えてください

開院と同時に前機種のオゾン水内視鏡洗浄機ONW-10を導入しました。故障もなく、良い機械だなと気に入って使用していましたが、ONW-10専用インジケータの販売終了に伴い、OED-1000S Plusへ買い替えました。

—ONW-10、OED-1000S Plusのご使用感を教えてください

スタッフと環境に優しい点でONW-10やOED-1000S Plusを気に入っています。
まず機械から排出される二オイが少なく、スタッフに影響がありません。その点がスタッフに優しいと思います。
またオゾン水は経時的に水に戻るもので、そのまま排水しても環境に影響がない点で、環境に優しいと考えます。
ランニングコストも低く、いいです。
B型肝炎ウイルスやC型肝炎ウイルスに対するオゾン水の検証のデータがある点も安心しています。

—OED-1000S Plusをどのようにご使用されているかスタッフの方に伺いました。

ONW-10と同じモードで使用しております。ONW-10より運転時間が早くなりました。
縦に内視鏡を巻く方法しか経験がありませんが、縦巻きでも特に問題ありません。
広いシンクがあるので、内視鏡を伸ばして洗浄しています。
シンクでのブラッシング洗浄を行う際、洗浄ブラシが破損していないか確認し、しっかり用手洗浄することを心がけています。



設置図①

オゾン水内視鏡洗浄消毒機

OED-1000S Plus：2021年設置。

- ・内視鏡の洗浄に適した広いシンクがあります。
- ・奥行きが小さく、内視鏡洗浄に適した広いシンクと並べても出っ張りません。



設置図②



設置図③

お問い合わせ先 株式会社IHI物流産業システム

